



Einfache Anwendung



① Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen, Reinigungsobjekt unter fließendem Wasser abspülen und einlegen.

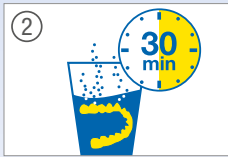

② Ca. 30 min. einwirken lassen. Lösung kann 3 bis 4 Tage verwendet werden.

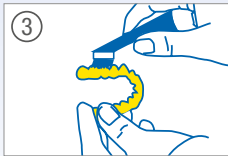

③ Gelöste Beläge mit Bürste entfernen und Objekt erneut abspülen.

cetron®

Erhältlich in
der Apotheke!



Überreicht von:

Reinigungsprodukt

für Zahnsperren, Schienen, Zahnersatz
und Sportmundschutz

DE 50/08/23 G REF PM0011.01



SCHÜ

