

# LC-Primer

## Verarbeitungshinweise

---

### Beschreibung/ Indikation:

LC- Primer ist ein lichthärtender Primer, der den chemischen Verbund zwischen PET-G Tiefziehfolien mit DURASPLINT® LC und CLEAR-BLOKKER® sicherstellt. Darüber hinaus ist der LC-Primer für Ergänzungen und Korrekturen zum Verbund von bereits ausgehärtetem DURASPLINT® LC mit CLEAR-BLOKKER® indiziert.

### Zusammensetzung:

Methylmethacrylat, multifunktionelle Acrylsäureester, Fotoinitiator

### Aushärtung:

1 x 5 Minuten im Laborlichtgerät (LC-6 Light Oven) mit je 3 UV-A Röhren und 3 VIS Röhren (Wellenlängenbereich 350 – 450 nm), die Röhren sind alternierend geordnet.

### Liefereinheiten:

10 ml

### Lagerbedingungen:

4 – 25°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



SCHEU-DENTAL GmbH  
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20  
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0  
fax +49 2374 9288-90

Facebook  
scheu.dental

SCHEUGROUP

DE/GB 1.000/10/21 G REF PM0084.01

